



KITE

Kit estéril, Perone Distal. _____

Datos e imágenes

Intrauma S.p.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y el acabado de los productos mostrados y descritos en este catálogo sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos ilustrativos con fines informativos. La información que se muestra es indicativa de algunas características generales de los productos mostrados.

Esta información no constituye ninguna descripción de las características específicas por parte del fabricante.

Por lo tanto, invitamos al cliente a siempre ponerse en contacto con la empresa Intrauma S.p.A. con el fin de obtener una información completa sobre las características específicas.

© Los contenidos de este catálogo están protegidos por los derechos de autor. Es posible la reproducción del contenido si Intrauma S.p.A. lo autoriza expresamente.

No se permite copiar ni distribuir este catálogo sin autorización previa.

KITE

Distal Fibula Sterile Kit.

El kit provee instrumental e Implantes de Single-use. Diseñados para mejorar la eficiencia de su quirófano.

Está optimizado para promover la eficiencia en los procedimientos, simplificando el manejo de instrumentos e implantes durante el procedimiento quirúrgico.

La innovadora instrumentación de Single-use le permite mantener la misma rutina quirúrgica en cada acto quirúrgico.

Mejorando el flujo de trabajo en el quirófano

El Kit Single-use, de instrumental e implantes está diseñado para ayudar a optimizar y eficientizar el flujo de trabajo en el quirófano.

Listo para usar

Diseñado para procedimientos quirúrgicos estándar, el kit básico se completa con instrumentos e implantes desechables de alta calidad: siempre nuevos, siempre completos y listos para usar.

Económico

El kit estéril de Peroné distal es una solución rentable. Los costos adicionales de limpieza, descontaminación, esterilización de instrumentos, desaparecen.




/ Kite Kit estéril, Perone Distal

Indicaciones

Kit de Peroné distal estéril "Kite" está indicado para:

- Fracturas diafisarias y metafisarias del peroné distal (4F3).
- Fracturas intra y extraarticulares del peroné distal (44-A/B/C).
- Retrasos de consolidación.

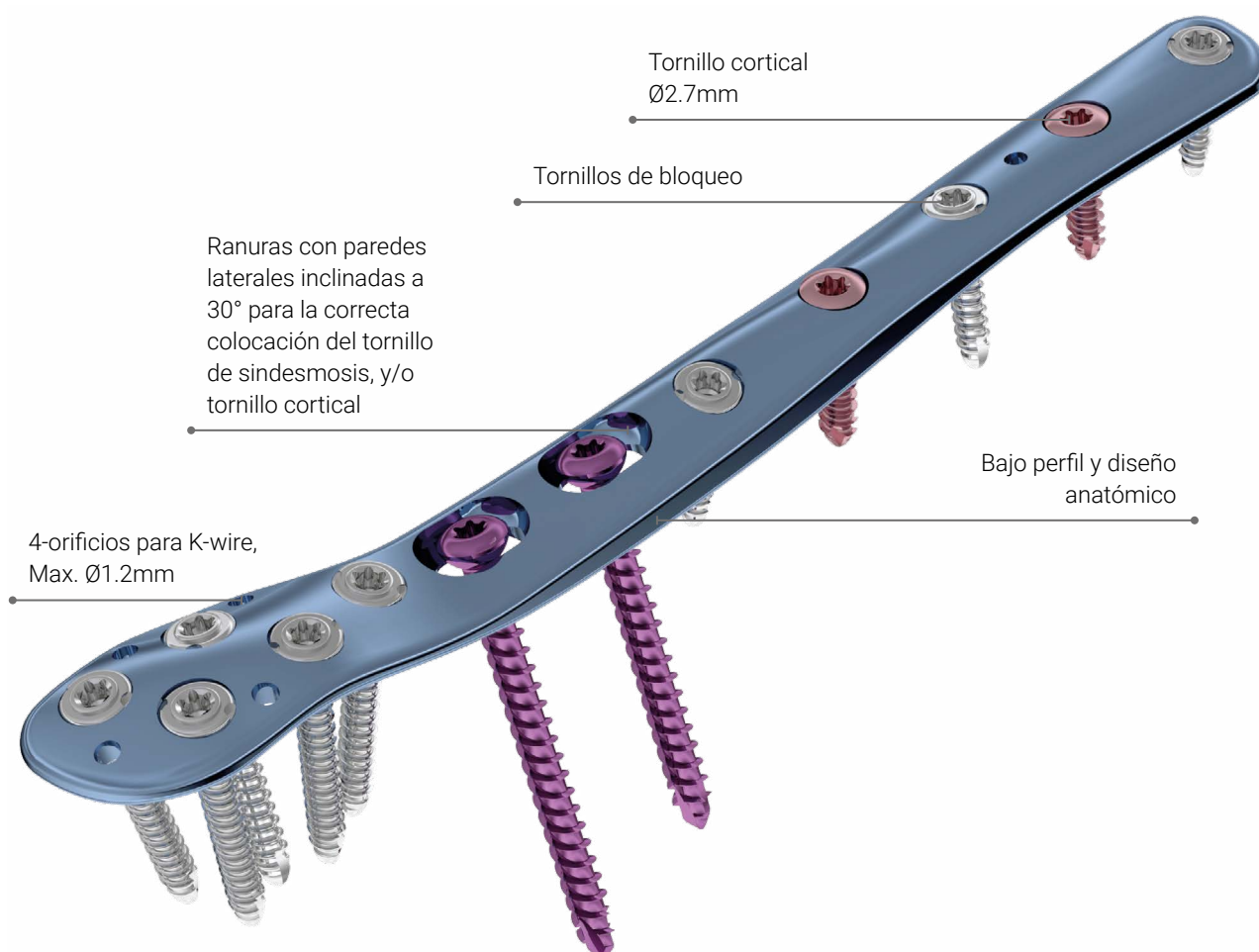

Técnica quirúrgica.

Posicionamiento del paciente:

el paciente se coloca en posición supina sobre una mesa radiolúcida. Se recomienda verificar la posibilidad de tener imágenes del Peroné distal, en vistas lateral y anteroposterior.

Abordaje:

realice un incisión quirúrgica, lateral o posterolateral recta para exponer la fractura del Peroné distal y de la diáfisis del peroné.

• 1

Usando la broca Ø2.2mm (SKM1.0007) y la guía de broca universal Ø2.2mm (SKM1.0001), haga un orificio para tornillo cortical SIN bloqueo de Ø2.7mm en la diáfisis.



• 2

Para determinar la longitud del tornillo, use el medidor de profundidad (SKM1.0002).



• 3

Inserte el tornillos con el HL8 Destornillador hexalobe (SKM1.0003).



Técnica quirúrgica.

• 4

Coloque la guía de broca cónica (SKM2.0004) en el casquillo de la placa.



• 5

Usando la broca Ø2.2mm (SKM1.0007) y la guía de broca cónica de Ø2.2mm (SKM2.0004) insertado en la arandela haga un orificio para bloqueo Ø2.5mm en la epífisis.



• 6

Retire la guía de broca cónica girando suavemente en el sentido de las agujas del reloj.



• 7

Inserte un tornillo usando HL8 destornillador hexalobe (SKM1.0003).



• 8

Proceda a insertar los tornillos de bloqueo restantes en la epífisis y los tornillos corticales SIN bloqueo en la diáfisis.




• 9

Si fuese necesario, inserte los tornillos de sindesmosis Ø3.0mm (No Incluidos) usando la guía de broca universal Ø2.2mm (SKM1.0001) y la broca.



Contenido del kit.

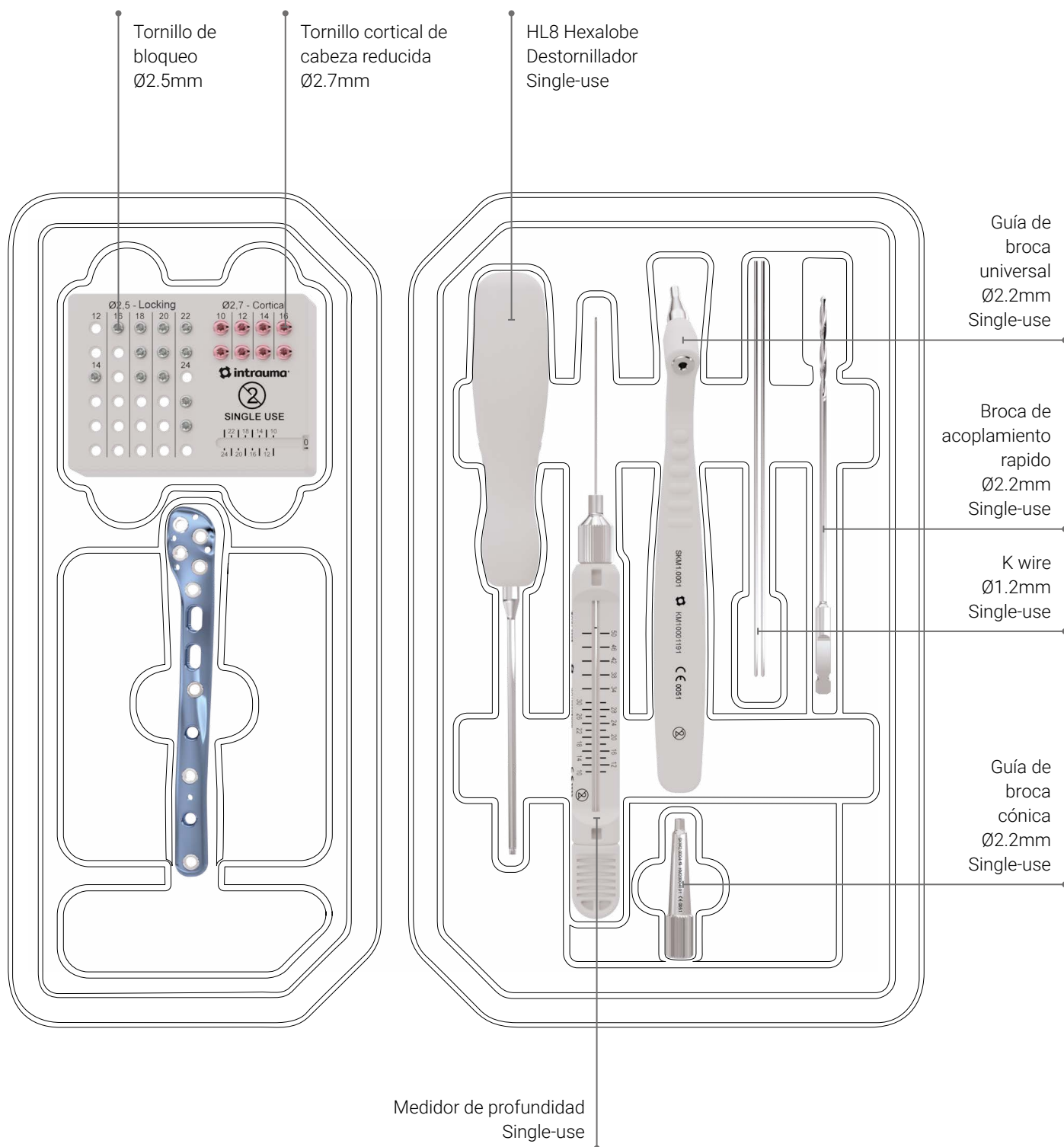

Información para pedidos.

Ref.	Descripción	L. mm	Orificios epífisis		Orificios diáfisis	
			Bloqueado	Libre	Bloqueado	Libre
KM2.7109	KIT - KITE Malleolar placa (IZQ) Corta	82	5	0	2	3
KM2.7110	KIT - KITE Malleolar placa (DER) Corta	82	5	0	2	3
KM2.7111	KIT - KITE Malleolar placa (IZQ) Mediana	107	5	0	3	4
KM2.7112	KIT - KITE Malleolar placa (DER) Mediana	107	5	0	3	4
KM2.7113	KIT - KITE Malleolar placa (IZQ) Larga	132	5	0	5	4
KM2.7114	KIT - KITE Malleolar placa (DER) Larga	132	5	0	5	4
T120.71XX	Placa de prueba KITE 120.7109-10-11-12-13-14 Disponible bajo pedido					

/ TORNILLO DE SINDESMOSIS* | ■ Ø3.0MM

Ref.	L. mm
120.2938	38
120.2942	42
120.2946	46
120.2950	50
120.2954	54
120.2958	58



Ti6Al4V - ISO 5832-3

*No incluidos

Materiales:

Placas | Titanio Ti6Al4V - ISO 5832-3

Arandelas y tornillos | Titanio Ti6Al4V - ISO 5832-3

