



KARPOS

Kit Fijador externo de muñeca. _____

Datos e imágenes

Intrauma S.p.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y el acabado de los productos mostrados y descritos en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes son ejemplos ilustrativos con fines informativos. La información que se muestra es indicativa de algunas características generales de los productos mostrados.

Esta información no constituye ninguna descripción de las características específicas por parte del fabricante.

Por lo tanto, invitamos al cliente a siempre ponerse en contacto con la empresa Intrauma S.p.A. con el fin de obtener una información completa sobre las características específicas.

© Los contenidos de este catálogo están protegidos por los derechos de autor. Es posible la reproducción del contenido si Intrauma S.p.A. lo autoriza expresamente.

No se permite copiar ni distribuir este catálogo sin autorización previa.

KARPOS

Kit Fijador externo de muñeca.

KARPOS kit proporciona un Fijador externo de muñeca e instrumental de Single-use. Diseñados para mejorar la eficiencia de su quirófano.

Está optimizado para promover la eficiencia en los procedimientos, simplificando el manejo de instrumentos e implantes durante el procedimiento quirúrgico.

La innovadora instrumentación de Single-use le permite mantener la misma rutina quirúrgica en cada acto quirúrgico.

Mejorando el flujo de trabajo en el quirófano

El Kit Single-use, de instrumental e implantes está diseñado para ayudar a optimizar y eficientizar el flujo de trabajo en el quirófano.

Listo para usar

Diseñado para procedimientos quirúrgicos estándar, el kit básico se completa con instrumentos e implantes desechables de alta calidad: siempre nuevos, siempre completos y listos para usar.

Económico

El KARPOS Kit Fijador externo de muñeca, es una solución rentable. Los costos adicionales de limpieza, descontaminación, esterilización de instrumentos, desaparecen.




/ KARPOS Kit Fijador externo de muñeca

Indicaciones

- Fracturas intra y extraarticulares y dislocaciones de muñeca con y sin daño de tejidos blandos.
- Politraumatismo.
- Dislocaciones del carpo.
- Fracturas no reducidas tras tratamiento conservador.
- Fijación preliminar antes del tratamiento con la técnica ORIF.

Características del producto

- Configurable para sistemas derecho e izquierdo.
- Barra articulada y abrazaderas ajustables y deslizantes para la correcta alineación del fijador con el centro de rotación de la muñeca.
- Pasador Ø4.0mm, extremos con rosca Ø2.5mm o Ø3.0mm.
- Instrumentos dedicados.

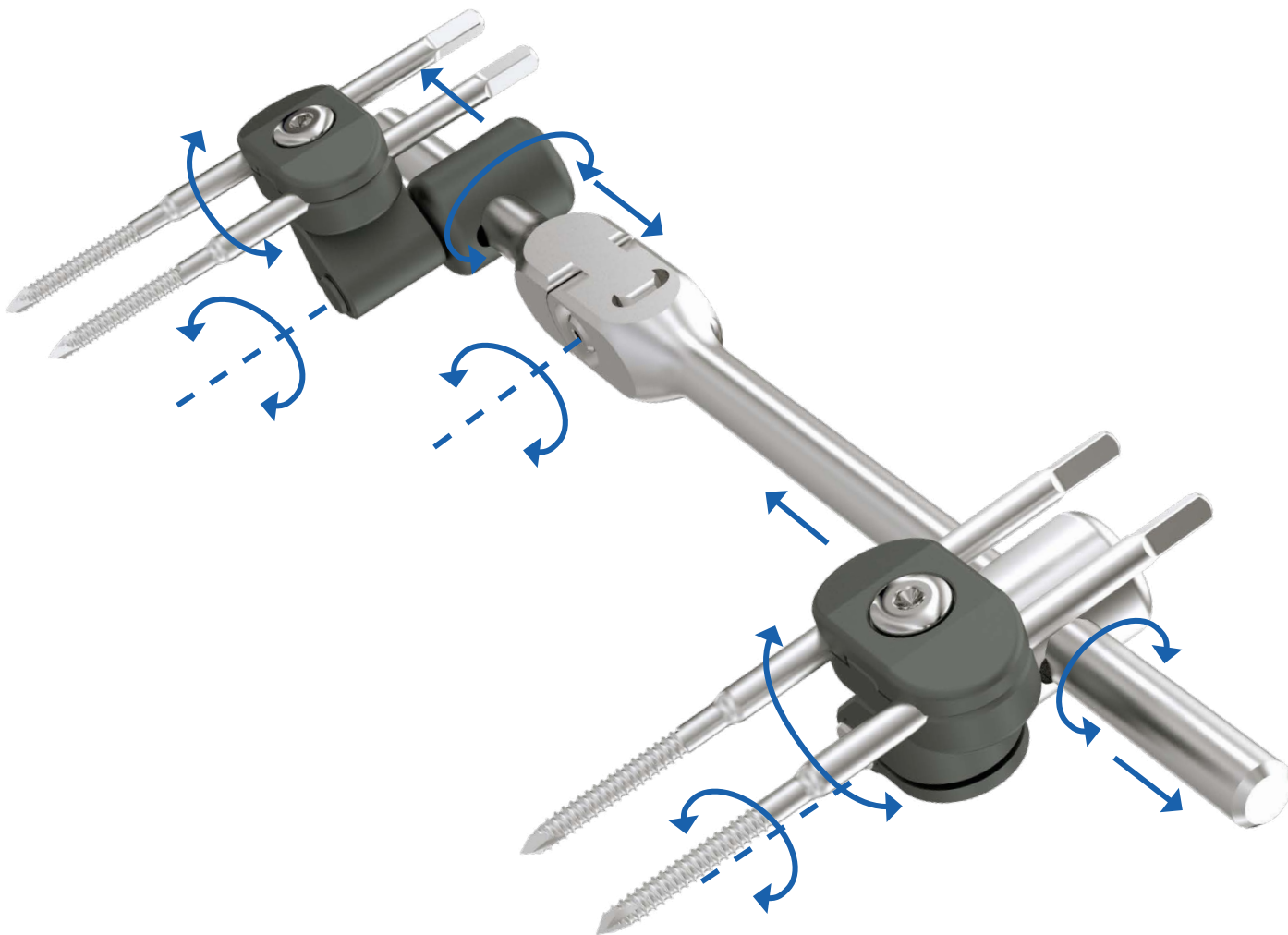


Advertencia

No se recomienda el uso del fijador externo en pacientes que no quieran o no puedan seguir las instrucciones de cuidado postoperatorio y en pacientes en los que no se puedan implantar tornillos debido a patologías óseas o de tejidos blandos.

Técnica quirúrgica.

El fijador se empaqueta bloqueado y en una configuración a la izquierda. Antes de comenzar el implante, afloje con la llave hexagonal de 3.0mm. (SXF2.0007) los tornillos del terminal alrededor de dos vueltas y todos los tornillos restantes y el tornillo sin cabeza alrededor de una vuelta para que las partes puedan girar/trasladarse libremente.

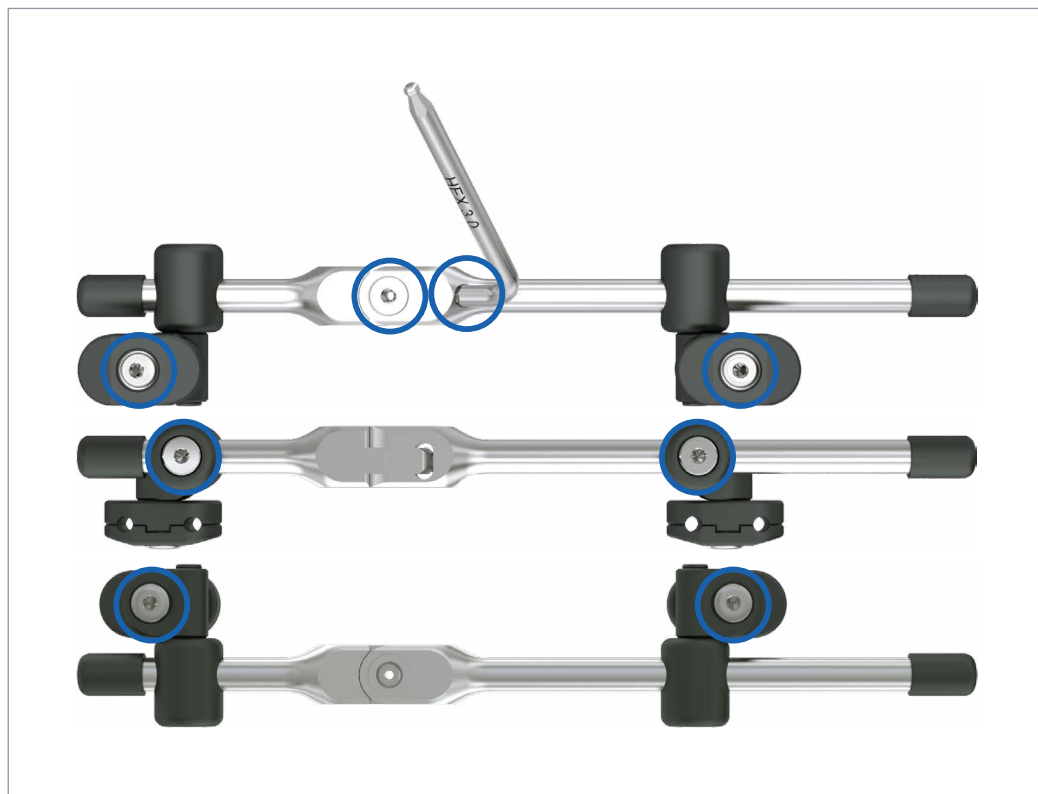

El fijador en configuración Derecha se obtiene quitando las tapas poliméricas de los extremos, invirtiendo los dos bloques deslizantes (el que estaba en la barra corta va a la barra larga y viceversa), girando las abrazaderas 180° alrededor del pasador del soporte deslizante y reposicionando el extremo.



• 1

Inserte la guía de broca SXF2.0002 (Ø2.0mm, para pin Ø2.5mm) o SXF2.0003 (Ø2.5mm, para pin Ø3.0mm) en la cánula larga de la guía paralela SXF2.0001. Apunte el manguito largo de la guía al segundo metacarpiano. Con la punta SXF2.0005 (Ø2.0mm, para pasador de Ø2.5mm) o SXF2.0006 (Ø2.5mm, para pasador de Ø3.0mm) perfora un orificio para la inserción del primer pasador.



• 2

Después de retirar la guía de broca, inserte el primer pasador en el orificio que acaba de perforar con el destornillador de base cuadrada (SXF2.0004) de 3mm. Asegúrese de que el pin penetre en la segunda cortical pero no salga para evitar dañar los tejidos blandos.




• 3

Manteniendo la guía en posición (con la cánula larga insertada en el primer pin y en contacto con el hueso), inserte la guía de broca SXF2.0002 (Ø2.0mm, para pin Ø2.5mm) o SXF2.0003 (Ø2.5mm, para pin Ø3.0mm) en la cánula corta de la guía paralela SXF2.0001. Con la punta SXF2.0005 (Ø2.0mm, para pasador de Ø2.5mm) o SXF2.0006 (Ø2.5mm, para pasador de Ø3.0mm) perfora un orificio para la inserción del segundo pasador.

**• 4**

Después de retirar el inserto de la guía de broca el segundo pasador en el orificio recién perforado con el destornillador de base cuadrada de 3mm (SXF2.0004). Asegúrese de que el pin penetre en la segunda cortical pero no salga para evitar dañar los tejidos blandos.

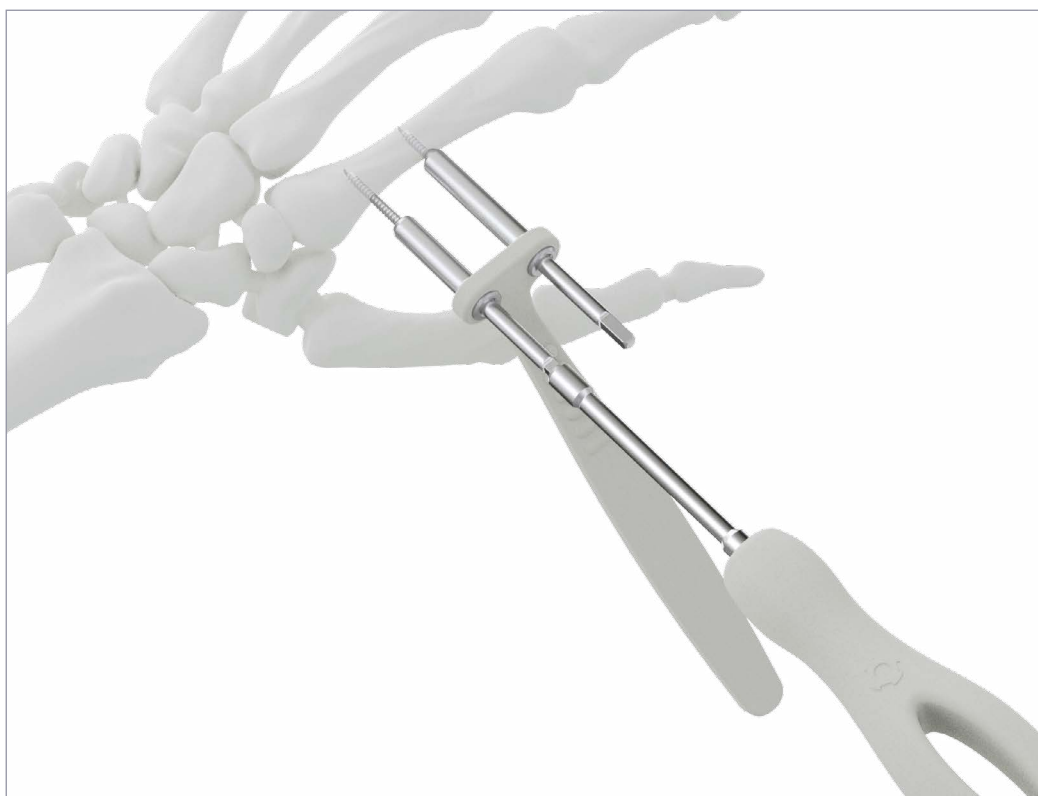


• 5-1

Coloque temporalmente el fijador con el fijador de la barra corta en los pines distales y marque la posición de los orificios distales en la piel para que estén dentro de la longitud útil del fijador.




• 5-2

Repitiendo los pasos 1. a 4., inserte el par de pines proximales en el radio.

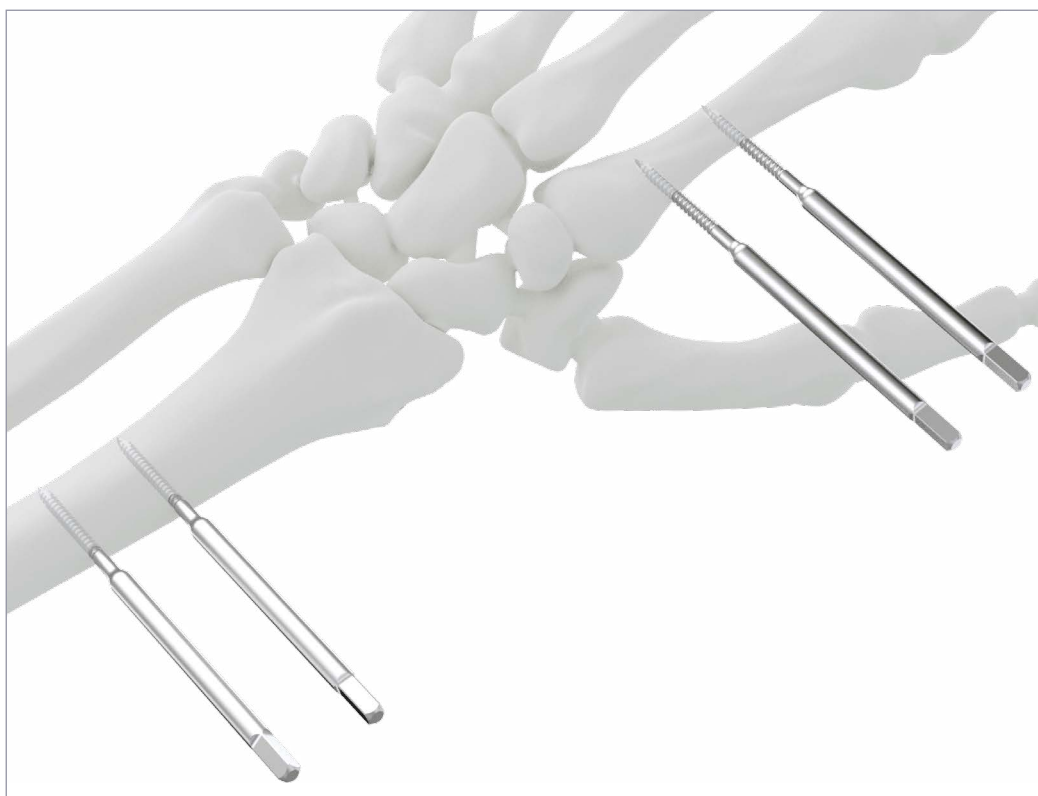


• 6

Coloque el fijador insertando las abrazaderas en los dos pares de pines; la barra corta se colocará distalmente. Asegúrese de que la cabeza del tornillo y la espiga de la junta central estén orientadas hacia los lados.

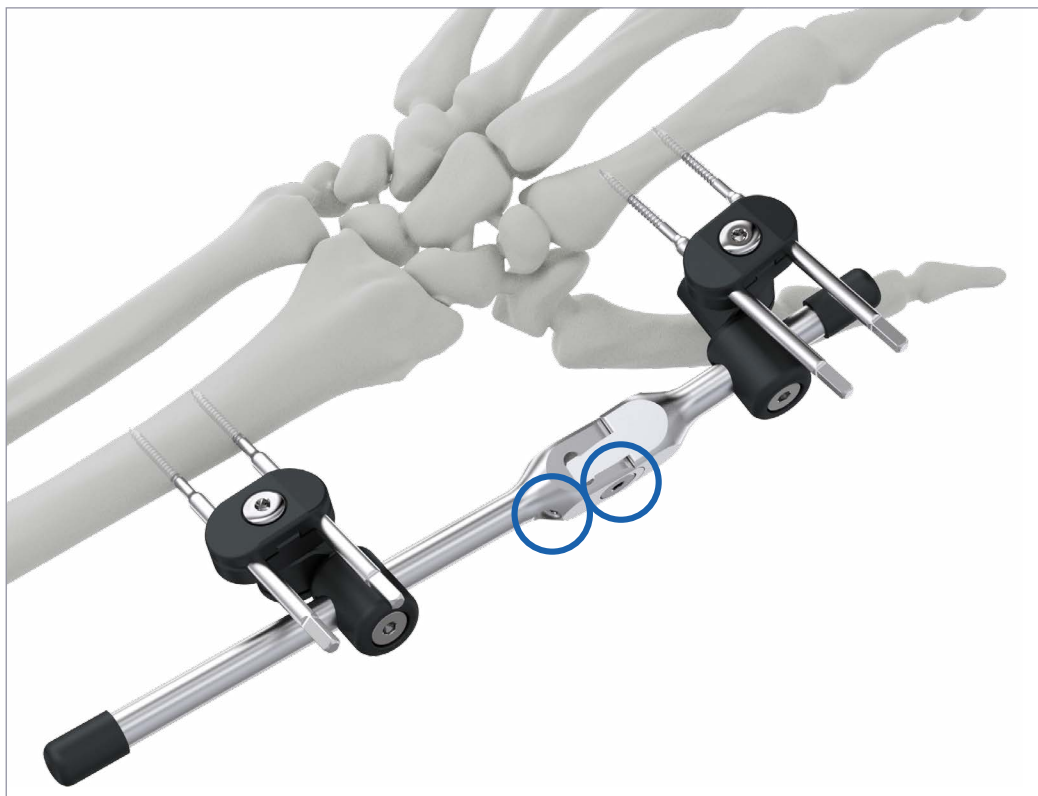


• 7

Alinee la bisagra central del fijador con el centro de rotación de la muñeca. Si es necesario, utilice como referencia el alambre de Ø1.8mm (SXF2.0008) K insertado en la canulación del tornillo de la articulación central.

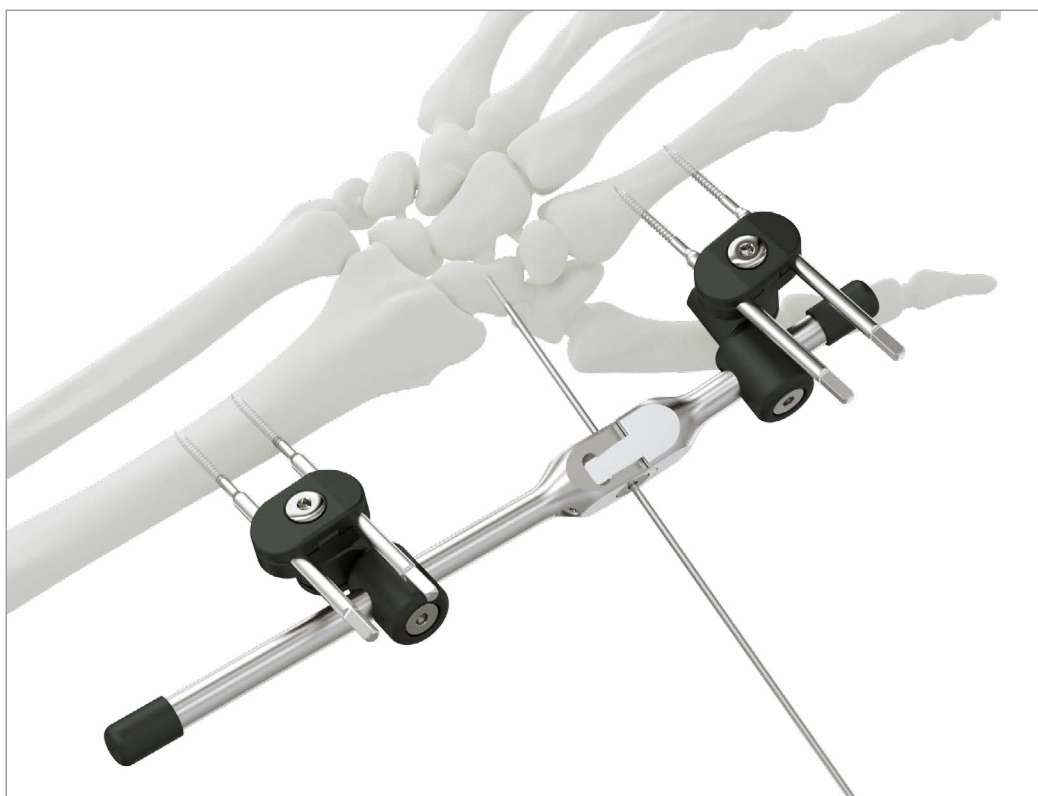

• 8

Bloquee el fijador en su lugar apretando todos los tornillos y el tornillo sin cabeza con la llave hexagonal (SXF2.0007) de 3.0mm.

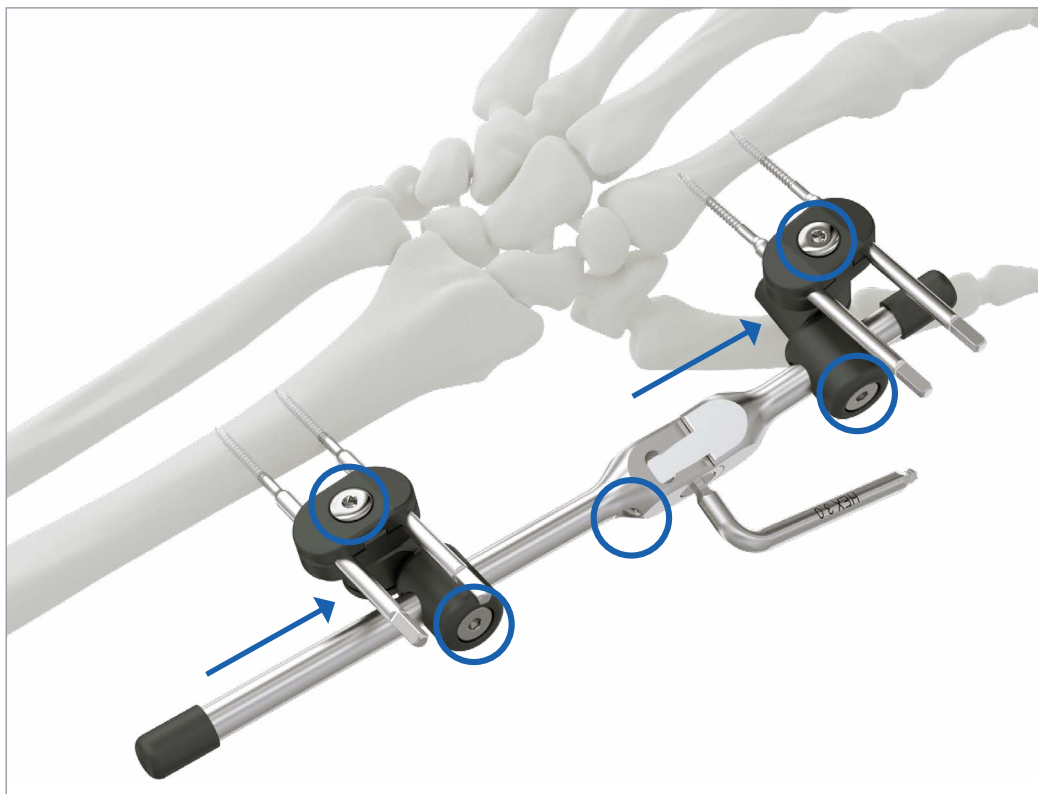


• 9

Inserte las tapas de polímero en la cabeza de los pines.



Contenido del kit.

Ref.	Descripción
KXF2.0001	KIT - KARPOS Fijador externo de muñeca

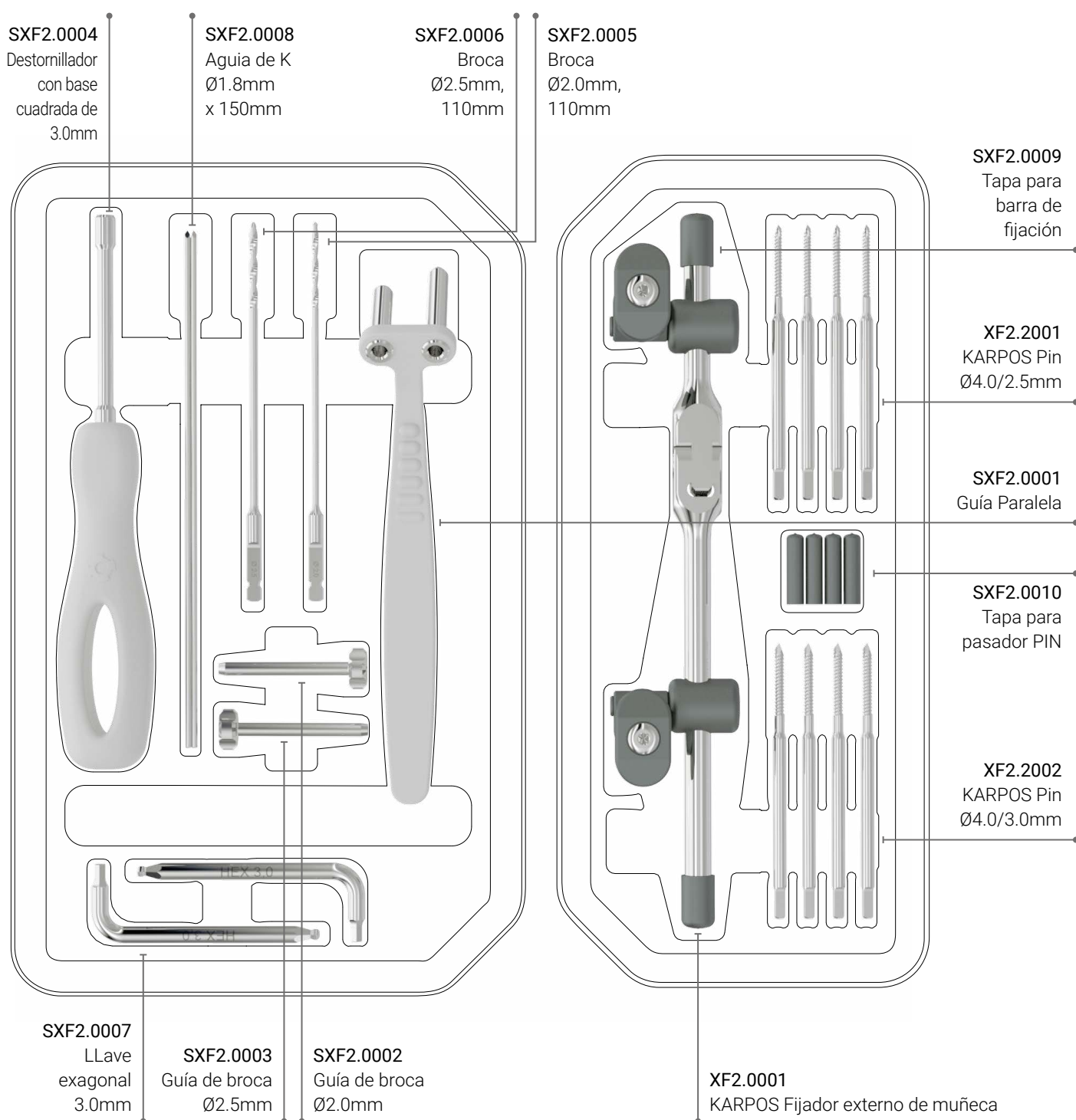



Intrauma S.p.A.

Sede legal y administrativa: Via Meucci, 5 - 10090 Bruino (TO) Italy

T: +39 011.95.39.496 | F: +39 011.95.88.385 | NIF: 09270550016 | intrauma.com | info@intrauma.com
