



TAKOfix

Kit Fijador externo de calcagno. _____

Datos e imágenes

Intrauma S.p.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y el acabado de los productos mostrados y descritos en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes son ejemplos ilustrativos con fines informativos. La información que se muestra es indicativa de algunas características generales de los productos mostrados.

Esta información no constituye ninguna descripción de las características específicas por parte del fabricante.

Por lo tanto, invitamos al cliente a siempre ponerse en contacto con la empresa Intrauma S.p.A. con el fin de obtener una información completa sobre las características específicas.

© Los contenidos de este catálogo están protegidos por los derechos de autor. Es posible la reproducción del contenido si Intrauma S.p.A. lo autoriza expresamente.

No se permite copiar ni distribuir este catálogo sin autorización previa.

TAKOfix

Kit Fijador externo de calcagno.

TAKOfix kit provee instrumental e Implantes de Single-use. Diseñados para mejorar la eficiencia de su quirófano.

Está optimizado para promover la eficiencia en los procedimientos, simplificando el manejo de instrumentos e implantes durante el procedimiento quirúrgico.

La innovadora instrumentación de Single-use le permite mantener la misma rutina quirúrgica en cada acto quirúrgico.

Mejorando el flujo de trabajo en el quirófano

El Kit Single-use, de instrumental e implantes está diseñado para ayudar a optimizar y eficientizar el flujo de trabajo en el quirófano.

Listo para usar

Diseñado para procedimientos quirúrgicos estándar, el kit básico se completa con instrumentos e implantes desechables de alta calidad: siempre nuevos, siempre completos y listos para usar.

Económico

El TAKOfix Kit Fijador externo de calcagno, es una solución rentable. Los costos adicionales de limpieza, descontaminación, esterilización de instrumentos, desaparecen.



/ TAKOfix Kit Fijador externo de calcagno

Indicaciones de uso

Fratture articolari del calcagno


- Sander's CT clasificacion I, II, III, IV
- Rowe's X-ray clasificacion IV

Fratture obliqua o coronal

- Rowe's X-ray clasificacion III

Caracteristica del producto


- Morsa orientable que permite la angulación de las guías K.
- Unidad de compresión y distracción que consiente la reducción de los fragmentos.
- Pines roscados orientables Ø3mm.
- Cánula guiada para la fijación provisoria.

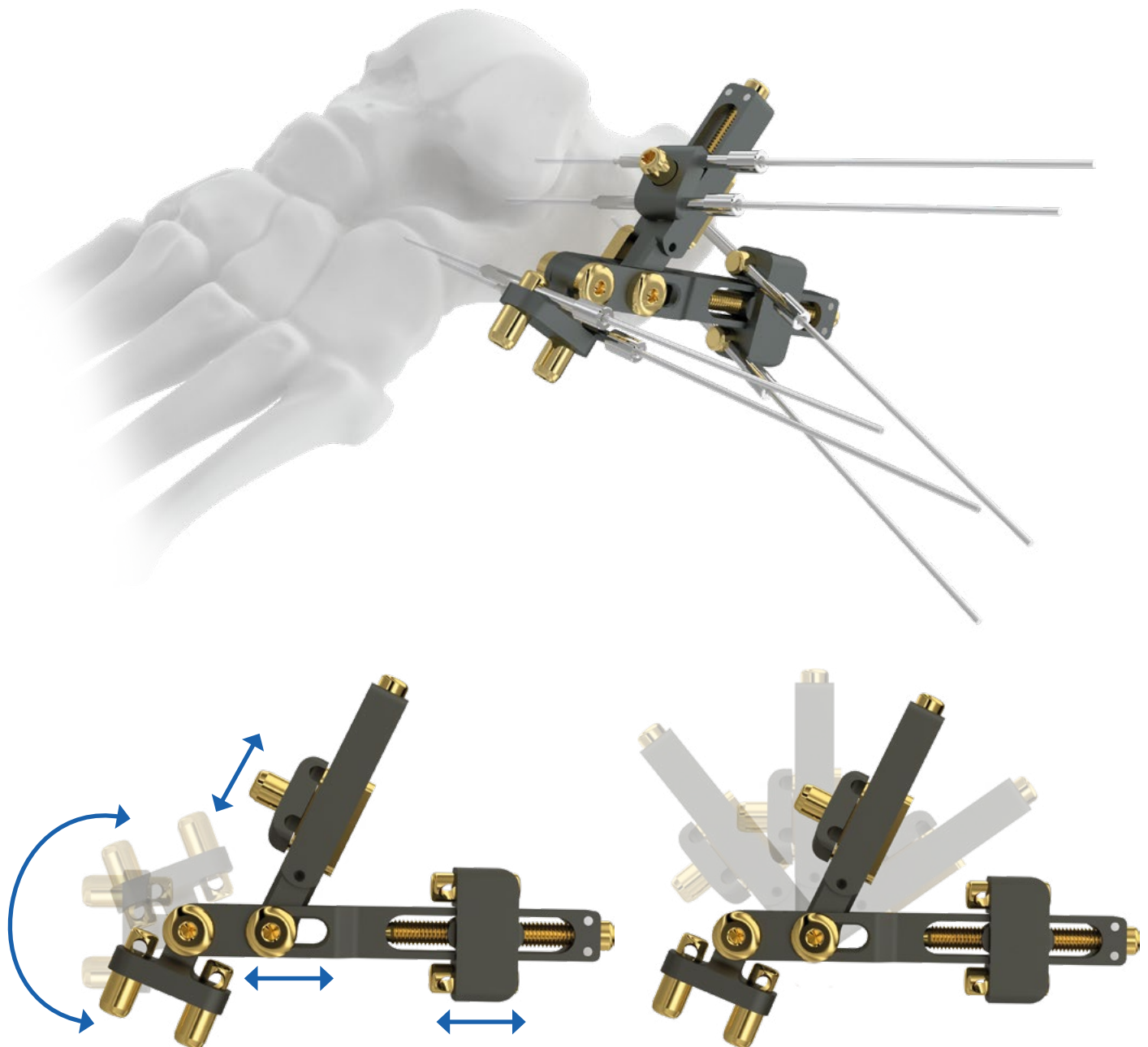

Técnica quirúrgica.

Preparación

Afloje los tornillos de los terminales aproximadamente dos vueltas con la llave hexagonal (SXF1.0003) de 3.0mm e inserte las cánulas de cable (SXF1.0001) en los terminales. Apriete las abrazaderas para que las cánulas permanezcan en su lugar pero se puedan mover axialmente con la mano. Usando la llave hexagonal, afloje los tornillos de la unión de la cabeza y la barra lateral para que puedan girarse manualmente manteniendo la posición (menos de una vuelta).

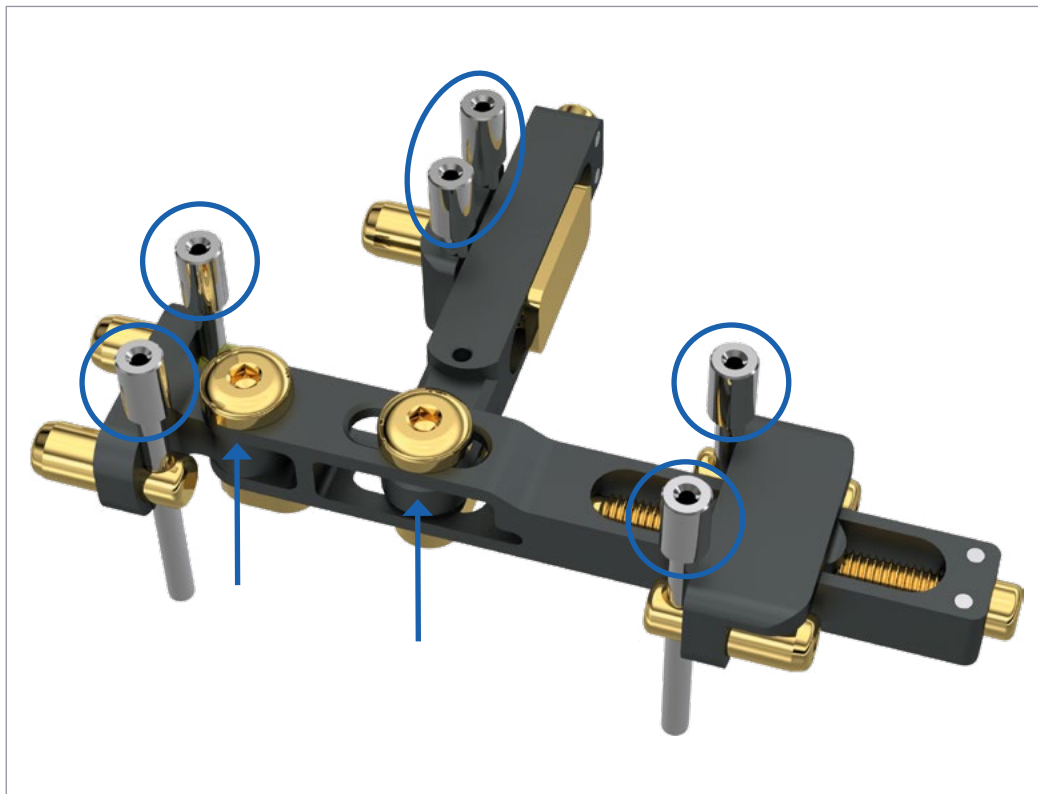


• 1

Primero identifique los puntos donde se insertarán los pines de acuerdo con el patrón de fractura.



• 2

Coloque el fijador en el calcáneo e ajuste manualmente la posición de las cánulas para que apunten a las áreas donde se insertarán los pines. La posición de las cánulas colocadas en el barra principal y barra lateral se podrán ajustar a lo largo del eje del mismo, actuando sobre los tornillos mediante la llave exagonal da 3.0mm (SXF1.0003).

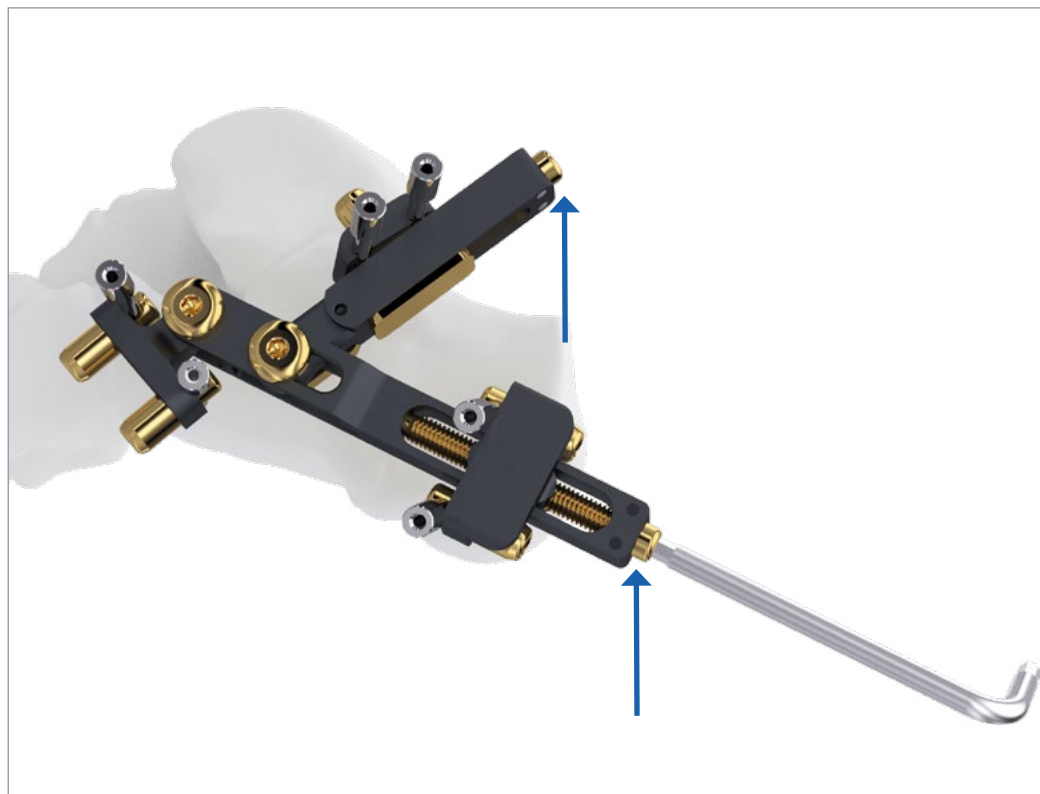

• 3

Inserte la primera aguja de estabilización (SXF1.0002) de Ø1.5mm a través de una cánula de barra lateral (SXF1.0001).



• 4

Inserte una segunda guía (SXF1.0002) a través de la segunda cánula de la barra lateral.



• 5

Inserte los cuatro alambres (SXF1.0002) restantes en las cánulas y las abrazaderas de la barra principal a través de las cánulas (SXF1.0001).




• 6

Afloje una primera abrazadera con la llave hexagonal (SXF1.0003) de 3.0mm y extraiga el alambre (SXF1.0002) y la cánula (SXF1.0001).




• 7

Con la llave en T de clavijas (SXF1.0005), inserte la clavija de Ø3.0mm (XF1.2001) o XF1.2002 en el terminal que acaba de liberar del alambre y la cánula.

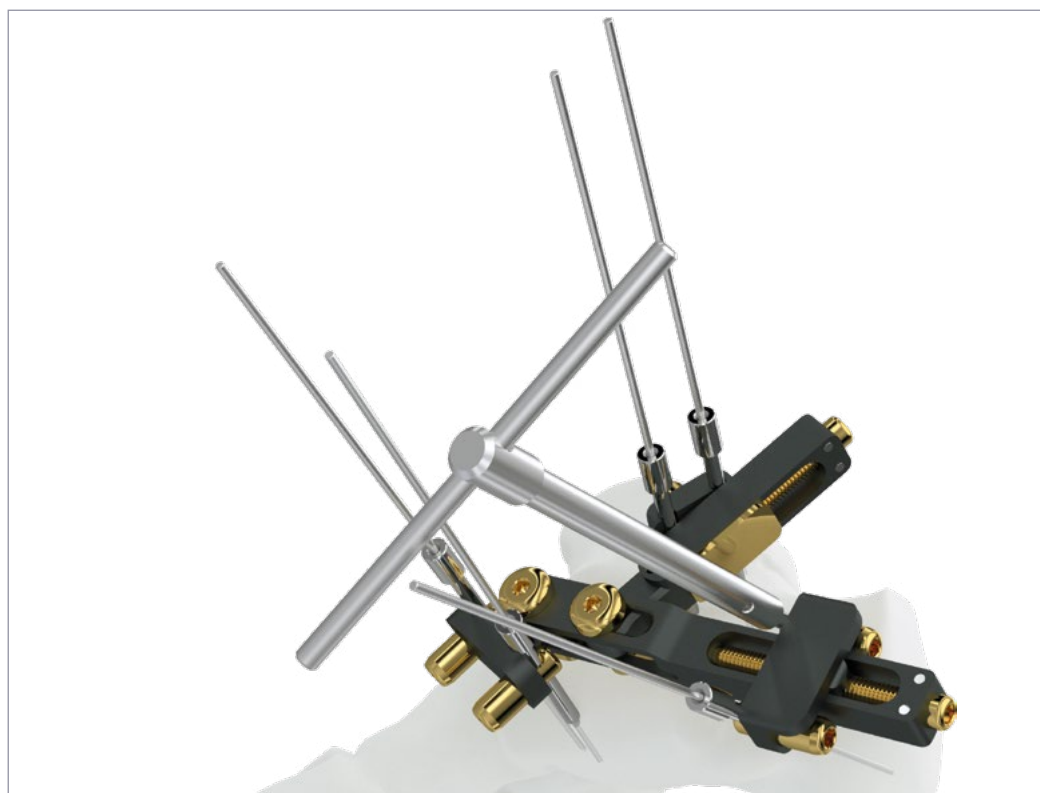

• 8

Con la llave hexagonal (SXF1.0003) de 3.0mm, bloquee la abrazadera del pasador que acaba de insertar.

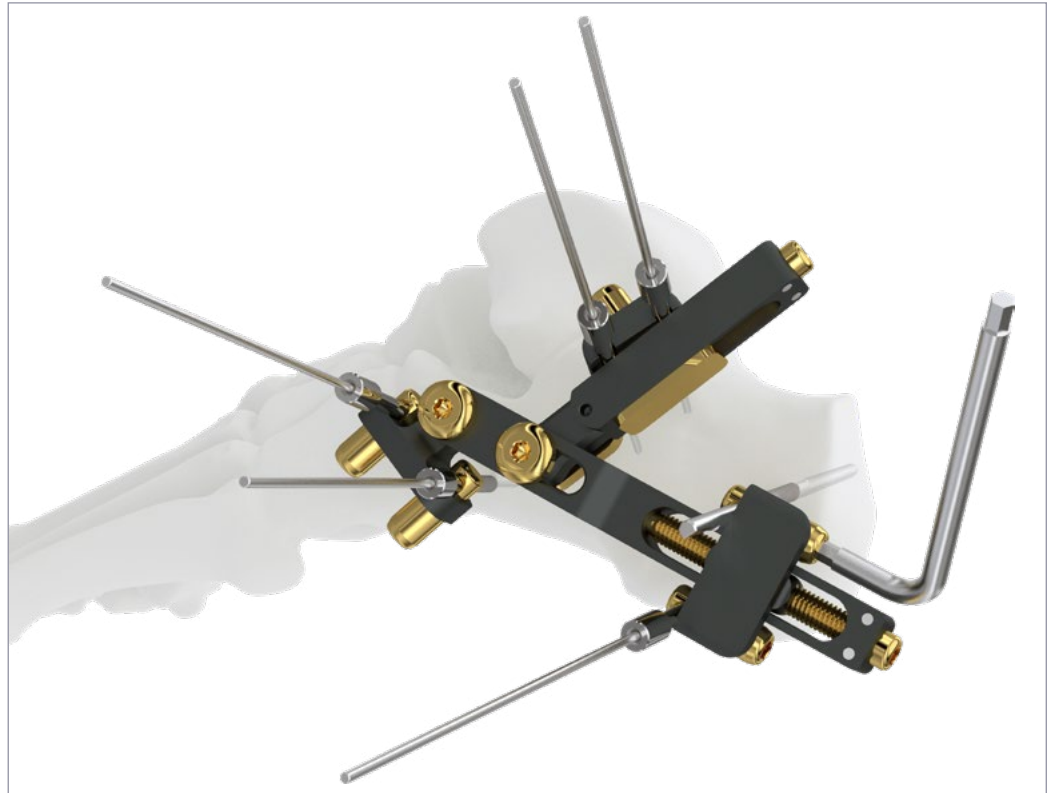


• 9

Repita los pasos 6. a 8. para los cinco pines de fijación restantes.



• 10

Apriete los tornillos de la junta del cabezal y de la barra lateral. Si es necesario, es posible traccionar los fragmentos actuando sobre los tornillos longitudinales de la barra principal y la barra lateral.

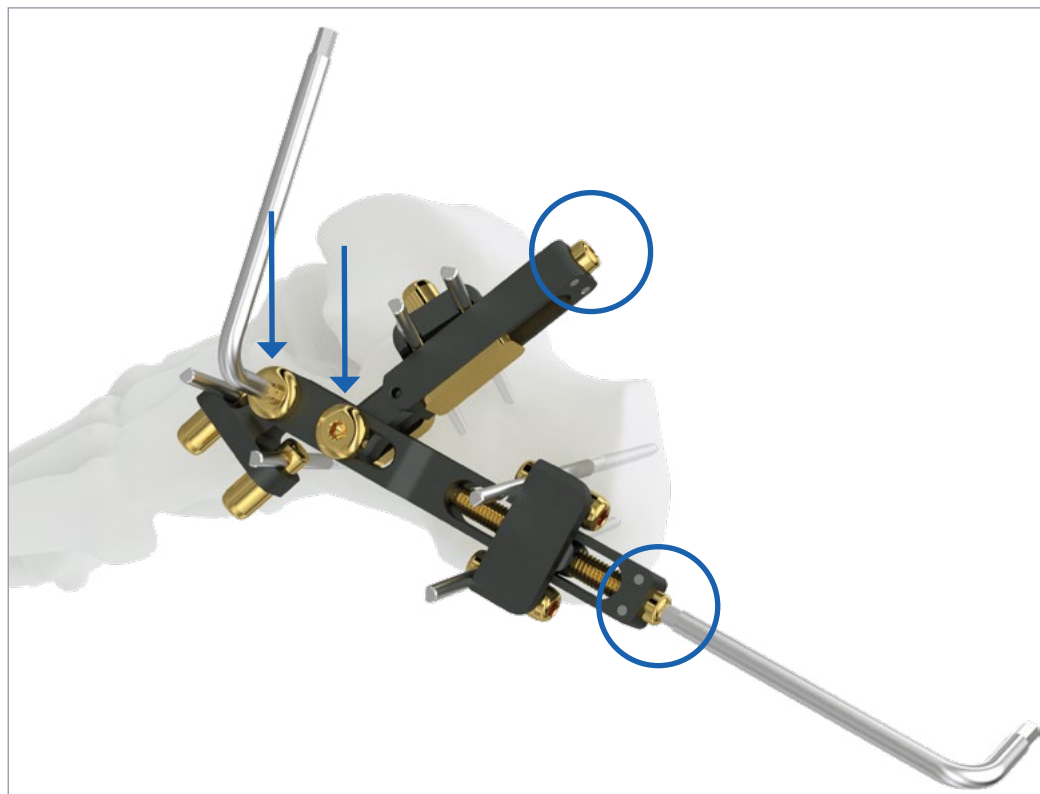


• 11

Inserte las tapas de polímero en las cabezas de los pines para protegerlos.



Contenido del kit.

Ref.	Descripción
KXF1.0001	KIT TAKOfix Fijador externo de Calcagno (IZ)
KXF1.0002	KIT TAKOfix Fijador externo de Calcagno (DE)

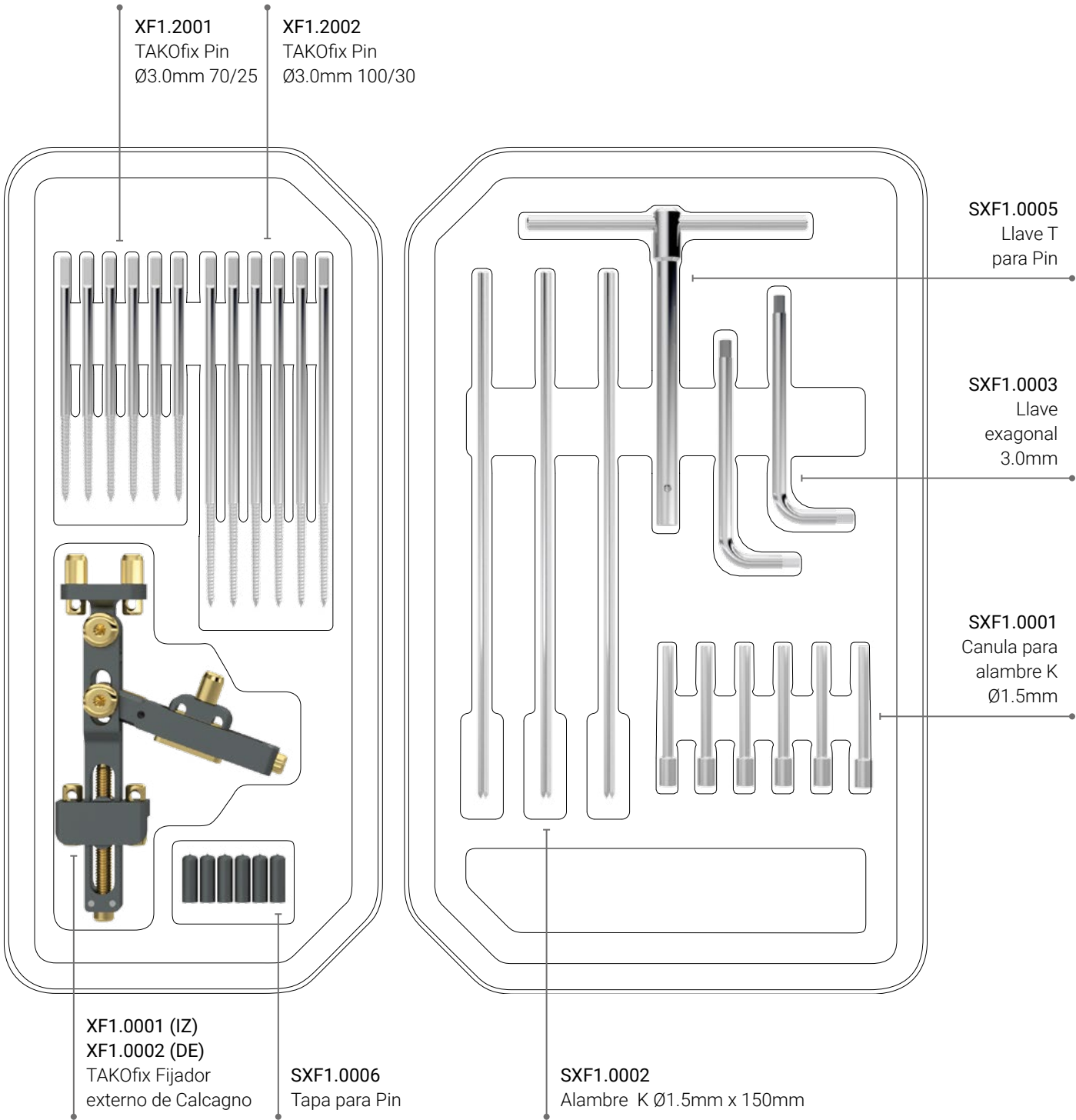



Intrauma S.p.A.

Sede legal y administrativa: Via Meucci, 5 - 10090 Bruino (TO) Italy

T: +39 011.95.39.496 | F: +39 011.95.88.385 | NIF: 09270550016 | intrauma.com | info@intrauma.com
